

職場での目のリラックスに

ミエゾウ

MIEZO

両眼視機能検査装置



国立大学法人 京都大学名誉教授
江島 義道 教授 監修

検査モード

- ・ 立体視検査
- ・ 眼位検査


データ管理

リラックス
モード

医療機器届出番号：
44B2X00001000005

DENKEN

🔍 検査モード

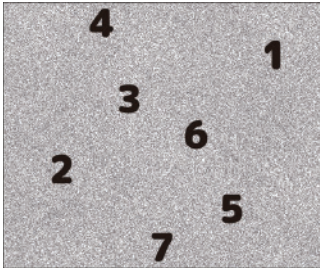

【立体視検査】

立体感や奥行感をチェックする検査です。
正解率が低いほど
両眼視機能が低下していることが分かります。

【眼位検査】

左右の目の向いている方向が
内寄り(内斜)または外寄り(外斜)等の程度が
チェックできる検査です。

👁️ リラックスモード


- 立体画像を見ることで、疲れた目をリラックスさせます。
- 遠くから近くへの間を、点滅しながら往復する立体画像を見ることで、目をリラックスさせるモードです。



点灯





消灯

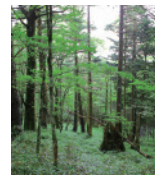

点灯



消灯

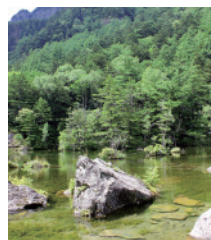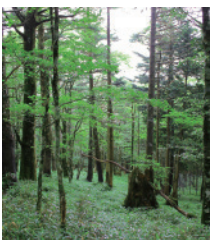

📌 長期的にいつも快適にお使いいただくための機能も充実！

- MIEZOでの検査データ、機器使用状況データをクラウドにて一元管理できます。
- リラックスモードの画像を追加できます。

📖 使い方・その他

- 操作方法は、レンズを覗いて**ジョイスティックを動かすだけ**。誰でも簡単に操作できます。
- 検査データをクラウドにて一元管理、データを分かりやすくまとめたレポートをWeb上でご確認頂けます。
業務改善や目の疲れの予防にお役立て頂けます。

厚生労働省は、情報機器作業に従事する人が心身の負担を軽減し
情報機器作業を支障なく行うことができるように
専門機関での視覚異常の検査(視力、屈折、斜位等)を関係事業者に対して指導しています。

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」

厚生労働省労働基準局

基発 0712 第3号 令和元年7月12日

長時間のPCや情報端末機器作業による 目のかすみ、頭痛、肩こり、倦怠感等が業務に影響していませんか？



頭が痛い・・・
肩がこる・・・
なんだかだるい・・・

目が疲れる・・・
かすんで見えにくい・・・



企業は、これらのことによって
目に見えない損失を被っています。

実は

これらは、**毛様体筋の疲れ**が原因かもしれません。

ピント調節を行う筋肉である毛様体筋は、
近くを見るときは緊張し、遠くを見るときは緩むことで
ピント調節を行っています。

ところが、パソコン作業などで近くを見続けると、
毛様体筋は緊張したままになり、疲れてしまいます。

毛様体筋の疲れは、自覚できません。

そのままにしておくと、頭痛や肩こり、倦怠感等に繋がるおそれがあります。



自覚できない毛様体筋の疲れ

毛様体筋は心臓と同じで、
自律神経系の支配下にありますから
疲労を感じることはできません。

そこで

MIEZOで目をリラックスさせましょう!!

MIEZOで**両眼視機能***を検査し、目を**リラックス**させましょう!



※ 両眼視機能とは、立体感や奥行感等を感じる能力のことをいいます。

両目の視力・ピント調節能力や眼位が正常でないと、両眼視機能は不完全になるといわれています。

仕様・特長



⚠ 安全に関するご注意

- 安全にご使用いただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
- 検査結果を自己判断せず、医師もしくは、医療従事者の指導の下にご使用ください。

仕様項目	製品仕様	本体カラー
販売名称	MIEZO(ミエゾウ)	 シルバー ローズゴールド
一般的名称	両眼視機能検査装置	
商品型式	EY1000	
医療機器届出番号	44B2X00001000005	
本体サイズ	H 374mm × W 210mm × D 233mm	
本体重量	約 2.0 kg	
電源	専用ACアダプタ	
モード	検査モード：立体視、眼位 リラックスモード：MIEZOリラックスモード	
インターフェース	Wi-Fi通信機能、USB端子	
使用環境温湿度	+10～+40℃ / 30～85%RH	

2020.03

製造販売元：株式会社デンケン

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築字中ノ原2832番地
TEL：0978-64-1670 FAX：0978-64-1671
URL：http://www.dkn.co.jp

総販売元：タイセイエンター株式会社

〒870-0903 大分県大分市向原沖1-2-73
TEL：097-556-2757 FAX：097-556-3168
e-mail：taisei46@fancy.ocn.ne.jp
URL：http://www.taiseienter.co.jp

お問い合わせ、ご用命は・・・